

"泰爾茂" 延長管

"Terumo" SAFEED Extension Tube

許可字號：衛署醫器陸輸字第 000180 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書遵照指示使用。


本產品為醫療用 PVC、ABS 材質製造的拋棄式延長導管，具有良好的彈性及柔軟性，表面光滑，透明度高，使用安全可靠。

【產品型號及規格】

SF*ET2022 SF*ET0525 SF*ET1725 SF*ET1725L SF*ET2527 SF*ET5527 SF*ET1020
SF*ET3520 SF*ET3520L22 SF*ET3825L SF*ET2527L SF*ET5527L

【主要結構及性能】

本產品主要由管身、雄接頭及雌接頭等組成，結構示意圖如下：

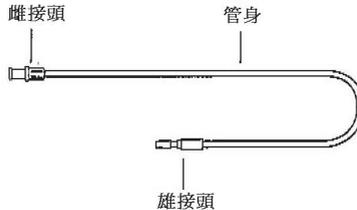

【適用範圍】

本產品主要供靜脈麻醉或靜脈輸液治療時延長輸液流路之用。

【注意事項】

- 不得用於輸血。
- 請避免藥液粘附於圓錐接頭表面，否則連接部可能產生鬆動。
- 為避免圓錐接頭可能產生裂痕，請遵守以下事項：
 - a. 請勿使用含有酒精的藥劑消毒連接部。
 - b. 請勿使用含油質顯影劑、酒精等的藥劑。
- 請勿在血管造影等高壓注入線上使用，以免發生產品破損。
- 本產品為拋棄式單次使用之滅菌產品，切勿重複滅菌或再次使用。
- 一旦發生產品污染或損傷等異常情況時，請勿使用。包裝破損時亦禁止使用。
- 開封後請立即使用，用畢銷毀。

【使用方法】

1. 從開封口撕開包裝袋，將產品從包裝袋中取出，注意防止污染。
2. 與其他圓錐接頭可靠地連接起來。

【使用期限】

- 本產品保存期限為 5 年。

【貯存方法】

- 貯存避免陽光直射及高溫多濕。

製造業者名稱：Terumo Medical Products(Hangzhou) Co.,Ltd
製造業者地址：M4-9-5 HETZ, 310018 Hangzhou, China
醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司
醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段4號8樓