

“泰爾茂” 餵食管

“Terumo” SAFEED Feeding Tube

許可字號：衛署醫器陸輸字第 000185 號


使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

【產品型號及規格】

型號	Fr. size	外徑 (mm)	長度 (cm)
SF*FT0380	3.5	1.2	35
SF*FT0580	5	1.7	40
SF*FT0585	5	1.7	100
SF*FT0880	8	2.7	40
SF*FT0885	8	2.7	100

【主要結構及性能】

本產品主要由導管及帶帽接頭所組成，均採用醫療用 PVC 材質製造，結構示意圖如下：

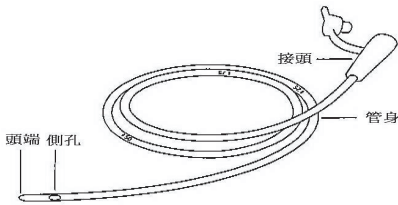

數字標記：SF*FT0380, SF*FT0580, SF*FT0880 刻度形態為“■”+數字 14、15、16、20；SF*FT0585, SF*FT0885 刻度形態為“■”+數字 25、50、75

【適用範圍】

本產品通過鼻腔插入胃內，為早產兒、手術病人、重症病人等不能經口攝取食物的患者補充營養用，請勿做其他用途。

【注意事項】

- 本產品長期留置體內時，每週應更換一次，胃液的長期作用可能使導管硬化。
- 因身體移動而使導管扭曲，有可能造成管路閉塞，固定時要注意導管長度要預留一定餘地。
- 本產品為拋棄式單次使用之無菌產品，切勿重複滅菌或再次使用。
- 一旦發生產品污染或損傷等異常情況時，請勿使用，包裝破損時亦禁止使用。
- 開封後請立即使用，用畢銷毀。

【使用方法】

1. 撕開包裝袋，從包裝袋中取出產品，注意防止污染。
2. 與連接器或注射器的錐形接頭等，可靠地連接起來。

【有效期間】

- 本產品有效期間為 3 年。

【滅菌方法】

- 本產品採用環氧乙烷氣體滅菌。

【貯存方法】

- 貯存時注意防水，避免陽光直射及高溫多濕。

製造業者名稱：Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd
製造業者地址：M4-9-5 HETZ, 310018 Hangzhou, China
醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司
醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段4號8樓