

"泰爾茂"注射針

"Terumo" Hypodermic Needle

衛部醫器陸輸字第 000759 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

<產品用途>

供一次性使用注射器配套使用，供臨床人體皮下注射和液體抽吸使用。與一次性輸液、輸血等配套供輸液、輸血使用。

<警告/注意事項>

警告

- 開啟包裝後請立即使用。使用後應適當廢棄針頭以降低感染風險。
- 拿取時請小心避免針扎。使用後請勿套回針頭套。

注意事項


- 僅限單次使用。使用 EO 滅菌。不得重新滅菌或再使用。
- 如果產品或包裝有破損或污染時請勿使用。

<使用說明>

1. 如圖示打開透明塑膠包裝。
2. 將針頭穩固接至針筒。
3. 直拉針頭套以移除之。針頭已滅菌可直接使用。

小心

避免拿取沒有針頭套的針頭。

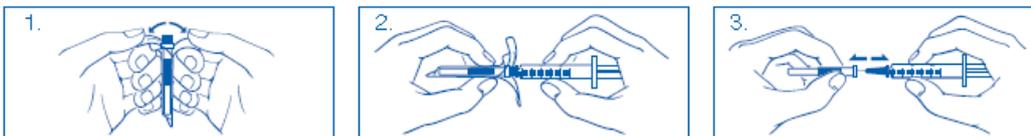

- 請勿儲存於極端的溫濕度中。儲存時避免接觸水或直射日光。

<產品規格>

針鞘尺寸	針鞘強度(mm)	針座顏色	針管管壁	針管長度
18G	0.55	Pink	薄壁	1”(25mm)
18G	0.55	Pink	薄壁	1 1/4 ”(32mm)
18G	0.55	Pink	薄壁	1 1/2 ”(38mm)
19G	0.55	Creamy yellow	薄壁	1”(25mm)
19G	0.55	Creamy yellow	薄壁	1 1/4 ”(32mm)
19G	0.55	Creamy yellow	薄壁	1 1/2 ”(38mm)
20G	0.65	Yellow	薄壁	1”(25mm)
20G	0.65	Yellow	薄壁	1 1/4 ”(32mm)
20G	0.65	Yellow	薄壁	1 1/2 ”(38mm)
21G	0.50	Green	薄壁	1”(25mm)
21G	0.50	Green	薄壁	1 1/4 ”(32mm)
21G	0.50	Green	薄壁	1 1/2 ”(38mm)
22G	0.50	Black	薄壁	1”(25mm)
22G	0.50	Black	薄壁	1 1/4 ”(32mm)
22G	0.50	Black	薄壁	1 1/2 ”(38mm)
23G	0.45	Blue	薄壁	1”(25mm)
23G	0.45	Blue	薄壁	1 1/4 ”(32mm)
23G	0.45	Blue	薄壁	1 1/2 ”(38mm)
24G	0.55	Purple	薄壁	3/4”(19mm)
24G	0.55	Purple	薄壁	1”(25mm)
24G	0.55	Purple	薄壁	1 1/4 ”(32mm)
24G	0.55	Purple	薄壁	1 1/2 ”(38mm)
25G	0.43	Orange	薄壁	5/8”(16mm)
25G	0.43	Orange	薄壁	1”(25mm)
25G	0.43	Orange	薄壁	1 1/4 ”(32mm)
25G	0.43	Orange	薄壁	1 1/2 ”(38mm)
26G	0.56	Brown	正常壁	5/8” (16mm)
26G	0.56	Brown	正常壁	1/2”(13mm)
26G	0.56	Brown	正常壁	3/8”(10mm)
27G	0.60	Grey	正常壁	5/8” (16mm)
27G	0.60	Grey	正常壁	1/2”(13mm)
27G	0.60	Grey	正常壁	3/8”(10mm)
28G	0.25	Blue-green	正常壁	5/16”(8mm)
28G	0.25	Blue-green	正常壁	1/2”(13mm)
29G	0.32	Red	正常壁	5/16”(8mm)
29G	0.32	Red	正常壁	1/2”(13mm)
30G	0.40	Light yellow	正常壁	5/16”(8mm)
30G	0.40	Light yellow	正常壁	1/2”(13mm)

*因應客戶需求增加產品型號：

產品型號與其規格：

產品型號	針鞘尺寸	針鞘強度(mm)	針座顏色	針管管壁	針管長度
MDNN1825	18G	0.55	Pink	薄壁	1”(25mm)
MDNN1832	18G	0.55	Pink	薄壁	1 1/4”(32mm)
MDNN1838	18G	0.55	Pink	薄壁	1 1/2”(38mm)
MDNN1925	19G	0.55	Creamy yellow	薄壁	1”(25mm)
MDNN1932	19G	0.55	Creamy yellow	薄壁	1 1/4”(32mm)
MDNN1938	19G	0.55	Creamy yellow	薄壁	1 1/2”(38mm)
MDNN2025	20G	0.65	Yellow	薄壁	1”(25mm)
MDNN2032	20G	0.65	Yellow	薄壁	1 1/4”(32mm)
MDNN2038	20G	0.65	Yellow	薄壁	1 1/2”(38mm)
MDNN2125	21G	0.50	Green	薄壁	1”(25mm)
MDNN2132	21G	0.50	Green	薄壁	1 1/4”(32mm)
MDNN2138	21G	0.50	Green	薄壁	1 1/2”(38mm)
MDNN2225	22G	0.50	Black	薄壁	1”(25mm)
MDNN2232	22G	0.50	Black	薄壁	1 1/4”(32mm)
MDNN2238	22G	0.50	Black	薄壁	1 1/2”(38mm)
MDNN2325	23G	0.45	Blue	薄壁	1”(25mm)
MDNN2332	23G	0.45	Blue	薄壁	1 1/4”(32mm)
MDNN2338	23G	0.45	Blue	薄壁	1 1/2”(38mm)
MDNN2419	24G	0.55	Purple	薄壁	3/4”(19mm)
MDNN2425	24G	0.55	Purple	薄壁	1”(25mm)
MDNN2432	24G	0.55	Purple	薄壁	1 1/4”(32mm)
MDNN2438	24G	0.55	Purple	薄壁	1 1/2”(38mm)
MDNN2516	25G	0.43	Orange	薄壁	5/8”(16mm)
MDNN2525	25G	0.43	Orange	薄壁	1”(25mm)
MDNN2532	25G	0.43	Orange	薄壁	1 1/4”(32mm)
MDNN2538	25G	0.43	Orange	薄壁	1 1/2”(38mm)
MDNN2616R	26G	0.56	Brown	正常壁	5/8”(16mm)
MDNN2613R	26G	0.56	Brown	正常壁	1/2”(13mm)
MDNN2610R	26G	0.56	Brown	正常壁	3/8”(10mm)
MDNN2716R	27G	0.60	Grey	正常壁	5/8”(16mm)
MDNN2713R	27G	0.60	Grey	正常壁	1/2”(13mm)
MDNN2710R	27G	0.60	Grey	正常壁	3/8”(10mm)
MDNN2908R	29G	0.32	Red	正常壁	5/16”(8mm)
MDNN2913R	29G	0.32	Red	正常壁	1/2”(13mm)
MDNN3008R	30G	0.40	Light yellow	正常壁	5/16”(8mm)
MDNN3013R	30G	0.40	Light yellow	正常壁	1/2”(13mm)

<產品包裝>

每盒含 100 隻注射針。

製造廠名稱：Yangzhou Medline Industry Co., Ltd.

製造廠地址：No.108, Jinshan Road Economic Development Zone,
225009, Yangzhou, Jiangsu, China

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：台北市中正區忠孝西路一段 4 號 8 樓