

"泰爾茂" 一次性使用安全注射針
"Terumo" Disposable Safety Hypodermic Needle
衛部醫器陸輸字第 000771 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

< 產品用途 >

本產品適用於一次性注射器配套使用，供臨床人體皮下注射和液體抽吸使用。與一次性輸液、輸血等配件搭配使用，是一種無熱原的醫療器材。

< 警語 >

- 取用時請小心避免針扎意外。
- 使用後不得將針套套回。
- 單次使用後隨即丟棄，並遵照當地安全標準處理。

< 小心 >

- 如果發現針頭彎曲或受損，請勿嘗試扳直針頭，且勿使用該針頭。
- 切勿為了使安全裝置失效而強行將針頭退出安全套鞘。

< 注意事項 >

- 使用和丟棄時手持位置務必保持在針頭後方。
- 對任何病患使用時應遵守一般注意事項。
- 若發現包裝或產品本身已破損或發生污染時請勿使用。
- 不得重新滅菌或重覆使用。
- 請勿儲存於極端的溫濕度環境。避免陽光直射。
- 啟動安全套鞘可能導致微量液體濺出，於注射後殘留在針頭上。為求安全起見，啟動安全套鞘時應使用單手技巧，且盡量遠離自身和他人。

使用說明

1. 小心自包裝取出針頭。
2. 以推入和順時針扭轉動作，將針頭穩固裝置於針筒上。
3. 將安全套鞘從針頭上朝針筒方向打開。安全套鞘將固定在您停止的位置（圖 1）。
4. 小心取下針套，避免損傷針頭。
5. 依照標準程序執行注射。

註：為了使用者方便，當針頭位於「斜角向上」位置時，套鞘朝向右側。

啟動：

6. 移動套鞘以準備啟動裝置：

使用單手技巧，以手指將突起向前推，使套鞘升起離針頭 90 度角以內（圖 2）。

註：您的手指務必隨時保持在突起後方。

7. 啟動套鞘：將套鞘抵住平面，調整至大約 45 度角（圖 3A）。**迅速大力**壓下針頭直到聽見清楚的**滴答聲**（圖 3B）。**以肉眼確認**針頭完全進入安全鎖中（圖 4）。

註：小口徑針頭的滴答聲可能較不清楚，應務必肉眼確認如圖 4 狀態。

8. 使用過的針頭和其他物料，請依照貴單位標準程序進行棄置，並注意符合國家和地方的尖銳物棄置規定。

圖 1


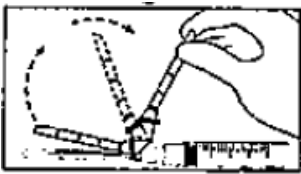


圖 2

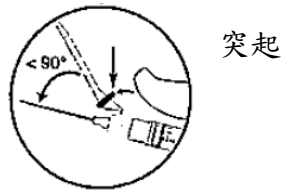

突起

圖 3A



圖 3B



圖 4



*註：安全鎖位置根據針頭口徑有所不同。

<產品規格>

Gauge Size	OD (mm)	Color code	Needle Length
18G	1.20	Pink	5/16"-1 1/2" (8mm-40mm)
19G	1.10	Creamy yellow	
20G	0.90	Yellow	
21G	0.80	Green	
22G	0.70	Black	
23G	0.60	Blue	
24G	0.55	Purple	
25G	0.50	Orange	
26G	0.45	Brown	
27G	0.40	Grey	
28G	0.36	Blue-green	
29G	0.33	Red	
30G	0.30	Light yellow	

*因應客戶需求增加產品型號:

產品型號與其規格:

產品型號	規格
MDSFNN1838	18G x 38mm
MDSFNN1832	18G x 32mm
MDSFNN1825	18G x 25mm
MDSFNN1938	19G x 38mm
MDSFNN1932	19G x 32mm
MDSFNN1925	19G x 25mm
MDSFNN2038	20G x 38mm
MDSFNN2032	20G x 32mm
MDSFNN2025	20G x 25mm
MDSFNN2138	21G x 38mm
MDSFNN2132	21G x 32mm
MDSFNN2125	21G x 25mm
MDSFNN2238	22G x 38mm
MDSFNN2232	22G x 32mm
MDSFNN2225	22G x 25mm
MDSFNN2338	23G x 38mm
MDSFNN2332	23G x 32mm
MDSFNN2325	23G x 25mm
MDSFNN2438	24G x 38mm
MDSFNN2432	24G x 32mm
MDSFNN2425	24G x 25mm
MDSFNN2419	24G x 19mm
MDSFNN2538	25G x 38mm
MDSFNN2532	25G x 32mm
MDSFNN2525	25G x 25mm
MDSFNN2516	25G x 16mm
MDSFNN2616	26G x 16mm
MDSFNN2613	26G x 13mm
MDSFNN2610	26G x 10mm
MDSFNN2716	27G x 16mm
MDSFNN2713	27G x 13mm
MDSFNN2710	27G x 10mm
MDSFNN2813	28G x 13mm
MDSFNN2808	28G x 8mm
MDSFNN2913	29G x 13mm

MDSFNN2908	29G x 8mm
MDSFNN3013	30G x 13mm
MDSFNN3008	30G x 8mm

製造業者名稱：Yangzhou Medline Industry Co., Ltd.

製造業者地址：No. 1, Huafa Road, Economic Development Zone, Yangzhou, Jiangsu, 225000, China

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段4號8樓