

“泰爾茂” 蝶翼靜脈注射針

“Terumo” Surflo Winged Infusion Set

衛署醫器輸字第 007651 號

產品用途: 本產品用於靜脈注射。

使用說明:

1. 從包裝中取出本產品。將該裝置的連接器牢固地連接到注射器的尖端或溶液或血液給藥裝置的連接器上。
2. 用手指握住蝶翼，從針頭上取下保護蓋。
注意: 取下保護蓋後，請勿直接接觸針頭。
3. 將溶液引入裝置中，直到溶液開始從針尖流出。
4. 進行靜脈穿刺。觀察到血液回流到管道中後，用膠帶將蝶翼固定在皮膚上。
不要存放在極端溫度和濕度下。避免陽光直射。

注意事項

警告: 在打開單一包裝後立即使用。一次性使用後請小心處理，以避免感染風險。

注意事項: 本產品限單次使用，請勿重複滅菌或重複使用。

如遇包裝破損、產品受損或被汙染，請勿使用。

規格：

型號	針頭規格	管長	顏色標誌
SV*19BI	19G	90mm	乳白
SV*19BLS	19G	90mm	乳白
SV*19CLK	19G	300mm	乳白
SV*21BI	21G	90mm	綠色
SV*21BLS	21G	90mm	綠色
SV*21CLK	21G	300mm	綠色
SV*22CLK	22G	300mm	黑色
SV*23BI	23G	90mm	深藍
SV*23BLS	23G	90mm	深藍
SV*23CLK	23G	300mm	深藍
SV*25BLS	25G	90mm	橘色
SV*25CLK	25G	300mm	橘色

SV*25EL	25G	200mm	橘色
SV*27DLJ	27G	200mm	灰色

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：台北市中正區忠孝西路一段 4 號 8 樓

製造業者名稱：Kofu Factory of Terumo Corporation

製造業者地址：1727-1, Tsujijarai, Showa-Cho, Nakakoma-Gun, Yamanashi Prefecture, Japan