

“泰爾茂” 輸液套

"TERUMO" TERUFUSION SOLUTION ADMINISTRATION SET

衛署醫器輸字第 007673 號

說明：可維持長時間穩定的點滴輸液

效能：將輸液劑從輸液瓶點滴注入患者靜脈內。

處方：遵照醫囑指示下，由專業人員操作。

規格：小兒輸液套 Solution Administration Set for Pediatric Use

產品編號	滴量	尖插頭	連接針頭處
TK*A200LK	60 滴/ 毫升	瓶用	橡膠

注意事項:

1. 60 滴等於 1ml 的點滴口，正確的控制點滴量。
點滴觀測腔每一 ml 均有刻度，清晰易辨。可以正確地計測輸液量。
計算每小時的 ml 量及每分鐘的點滴數，均很方便。
2. 安全固定帶
萬一輸液套經拉扯，用力過強，尖插頭可能脫落。
安全固定帶能防止脫落的發生。
3. 通氣穩定，點滴順暢
防水過濾膜濾除細菌或異物，通氣不間斷，保持點滴穩定順暢。
4. ELASTYBALL 確認靜脈穿刺
穿刺後輕拍 ELASTYBALL，血液回流，即能確定已經穿刺入靜脈內。
自動重複封閉的 ELASTYBALL，亦能方便又安全地混注其他藥劑。
5. 過濾膜性能卓越
單纖維製成的過濾膜，絕對不會產生纖維屑的汙染，40 μ 的濾膜孔徑，濾除 50 μ 以上異物的效果高達 99.9%。

製造廠名稱：KOFU FACTORY OF TERUMO CORPORATION

製造廠地址：1727-1, TSUIJIARAI, SHOWA-CHO, NAKAKOMA-GUN,
YAMANASHI PREFECTURE, JAPAN

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：台北市中正區忠孝西路一段4號8樓