

# "泰爾茂"輸液套

## "Terumo" Terufusion Solution Administration Set

### 衛署醫器輸字第 022803 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

型號：TI\*U200L07

#### <產品用途>

本產品為可即刻使用並限單次使用的輸液套，其用途為進行大量藥品的靜脈點滴注射。

#### <注意事項>

##### 警告

打開產品包裝後請立即使用。請於單次使用後安全棄置以避免感染風險。

##### 注意事項

- 僅限單次使用。使用伽瑪射線滅菌。請勿重覆滅菌或重覆使用。
- 如果產品包裝或產品本身已破損或污染時請勿使用。
- 欲在輸液控制器上使用本產品時，請向控制器廠商查詢其相容性。
- 本產品搭配無偵測阻塞功能的輸液控制器使用時，可能導致連接處分離，或因阻塞產生過度壓力造成本產品損壞。
- 請勿直接碰觸塑膠尖梢、通氣針、靜脈穿刺針，或其他任何無護套的套管。
- 某些含空氣阱連結器的輸液套中所附的靜脈穿刺針，不可連接於針筒、其他種類輸液套、或其他裝置。

#### <使用說明>

##### 注意

- 輸液套若未隨附靜脈穿刺針，使用前請於輸液套接頭部分緊密接上靜脈穿刺針頭或其他適當裝置。
- 本產品搭配裝置使用時，如靜脈穿刺針、蝴蝶針、IV 導管或輸液控制器，請遵循該裝置廠商說明書的使用說明和注意事項。


1. 若欲使用裝在瓶形容器中的液體，應使用通氣針。請將容器開口朝上，取下通氣針護套，於容器的橡膠瓶塞上標示圓圈處將通氣針垂直完全插入。如果輸液套未提供通氣針，請使用適當的通氣針。
2. 將輸液套的滾輪管鉗完全關閉。取下輸液套塑膠尖梢的護套，於輸液容器的橡膠瓶塞上標示圓圈處將尖梢垂直完全插入。
3. 將已連接輸液套的輸液容器吊起。使用手指緩慢擠壓點滴筒再放開，使其裝載輸液至半滿。
4. 打開滾輪管鉗。確認輸液已流至輸液套末端，再將管鉗完全關閉。
5. 確認輸液套與靜脈穿刺針（或連接於輸液套的裝置）之間的連接牢固。直向拉出針頭護套

將其取下。執行靜脈穿刺，將針頭固定於皮膚。

6. 打開滾輪管鉗開始輸液。滾輪管鉗應漸進開啟，調整至需要的點滴速度。

點滴速度：1mL  $\doteq$  20 滴

- 請勿儲存於極端的溫度和濕度中。避免日光直射。

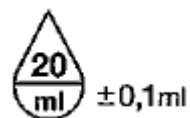

每毫升 20 滴



非熱原性



製造商



不含 DEHP



不含乳膠

### <規格>

| 產品型號       | 流管直徑<br>(Tubing diameter)                          | 流管長度<br>(Tubing Length) | 點滴流速<br>(Drip rate)       | 靜脈針 | 通氣針 |
|------------|--|-------------------------|---------------------------|-----|-----|
| TI*U200L07 | 外徑(OD): $\varphi$ 3.3mm<br>內徑(ID): $\varphi$ 2.1mm | 1300mm                  | 1mL $\doteq$<br>20drops 滴 | 21G | x1  |

製造廠名稱：(O)TERUMO CORPORATION

(P) Kofu Factory of Terumo Corporation

製造廠地址：(O) 44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

(P) 1727-1, Tsuijirai, Showa-cho, Nakakoma-gun, Yamanashi Prefecture,  
Japan

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：台北市中正區忠孝西路一段 4 號 8 樓