

"泰爾茂"胰島素注射筆專用針

"Terumo" FINEGLIDE Insulin pen needle

衛部醫器輸字第 036590 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

產品敘述

本產品為搭配胰島素注射筆使用的一次性無菌針頭,供應給使用胰島素注射的糖尿病患者。

操作方法

1. 撕開密封紙。
2. 使用外部保護蓋,將專用針垂直安裝於注射筆(安裝時勿有角度傾斜)。
3. 垂直拔除保護蓋並保留。
4. 拔除內保護蓋。
5. 快速的穿透皮膚,緩慢注入胰島素。
6. 小心地將外保護蓋套回(如果是自行注射)。
7. 鬆開專用針,並根據醫事人員的建議,安全地處理使用過之產品。

警告

請勿讓兒童在沒有父母監護的情況下使用本產品。

避免感染

1. 請勿使用包裝有損毀或經拆封之產品。
2. 請勿使用超過包裝標示之保存期限之產品。
3. 使用前,應根據醫師指示徹底清潔注射部位。
4. 本產品限一次性使用。
5. 請勿重複使用、清潔 及/或重新滅菌本產品。
6. 在注射後,小心地將保護蓋套回來並立即丟棄。請遵照醫事人員的建議,妥善進行處理。
7. 如果不遵守這些說明,有感染的風險。
8. 如果有任何健康問題,應尋求醫療照顧。請勿使用他人之胰島素注射筆。
9. 為避免可能傳播嚴重感染之意外針刺傷,切勿重新蓋上、取下或銷毀已使用過的產品。

獲取正確的劑量

1. 請諮詢您的醫師,使用正確長度的針頭。
2. 每次注射前,根據使用說明書確保您使用的注射筆其針頭可以讓藥液自由流動。
3. 根據醫師的建議和注射筆的使用說明書,緩慢地注入。
4. 每次注射後檢查是否有藥液從針頭、注射筆,或注射部位滴落。
5. 如果發現有藥液滴落,應遵照醫師指示處理可能不足的藥劑量。
6. 如果有任何健康問題,應尋求醫療照顧,避免彎折或折斷筆針。
7. 插入或拔出皮膚時不要更改注射筆和針頭方向。

8. 如果針頭卡在身體裡或消失在皮膚,請立即就醫。

安全舒適的注射

1. 根據醫師的建議定期更換注射部位。如果不這樣做,可能會導致組織硬化。
2. 在室溫下注射藥物。
3. 注射前,確保注射筆內沒有氣泡。
4. 注射前,等待外用酒精(如果使用)完全蒸發。
5. 注射時保持注射區域的肌肉放鬆。
6. 快速插入皮膚。
7. 進針或拔針時不要改變方向。
8. 不要重複使用注射筆專用針。

適用之注射筆品牌

注射筆名稱	注射筆名稱
Apidra SoloStar	NovoLogMix70/30 FlexPen
Lantus SoloStar	Victoza Pen
Humalog KwikPen	NovoPen 3
HumalogMix 50/50 KwikPen	NovoPen 4
HumalogMix 75/25 KwikPen	NovoPen Echo
Humulin N Pen	NvoPen Junior
Humulin 70/30 Pen	Byetta Pen 5mcg
HumaPen Luxura	Byetta Pen 10mcg
Forteo	SymLinPen 60
LevemirFlexPen	SymLinPen 120
NovoLog FlexPen	AutoPen

儲存條件

1. 保持乾燥的地方。
2. 遠離陽光。
3. 保持溫度在 30 度以下。

型號及規格

產品型號	Gauge	針長(mm)
571346	29G	4mm
571347	29G	5mm
571348	29G	6mm

571349	29G	8mm
571350	29G	12.7mm
571341	30G	4mm
571342	30G	5mm
571343	30G	6mm
571344	30G	8mm
571345	30G	12.7mm
571336	31G	4mm
571337	31G	5mm
571338	31G	6mm
571339	31G	8mm
571340	31G	12.7mm
571434	32G	4mm
571332	32G	5mm
571333	32G	6mm
571334	32G	8mm
571335	32G	12.7mm

醫療器材商名稱:台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：台北市中正區忠孝西路一段4號8樓

製造業者名稱：Tae-Chang Industrial Co., Ltd. Gumi Plant

製造業者地址：127, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korea