

“泰爾茂” 一次性使用胃導管 “TERUMO” SAFEED STOMACH TUBE 衛署醫器陸輸字第 000188 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用


本產品為醫療用PVC材質製造的拋棄式鼻胃管，具有良好的彈性及柔軟性，表面光滑，透明度高，使用安全可靠。

【產品型號、規格】

型號	長度 (cm)	尺寸 (Fr)
SF*GT1C12	125	12
SF*GT1C14	125	14
SF*GT1C16	125	16
SF*GT1C18	125	18

【主要結構及性能】

本產品主要由管身、錐形接頭所組成，結構示意圖如下：

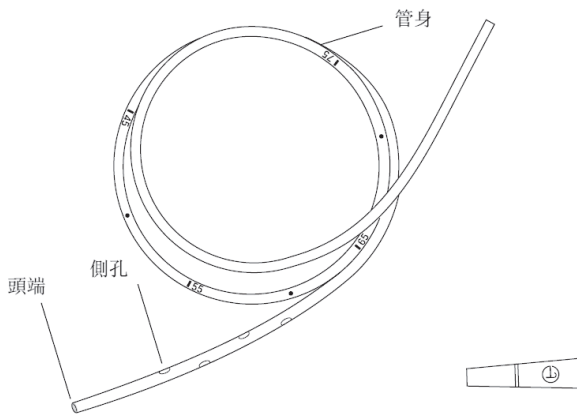

數位標記：管身上有“|”+數位表示的刻度標識，從頭端開始數位刻度為45、55、65、75cm。

【適用範圍】

本產品通過口腔或鼻腔插入胃內，用於消化器官切除手術後或消化器官疾病治療時、採取胃液、胃部清洗、胃部藥物或營養液注入，以及手術後的排液等，請勿用於其它用途。

【注意事項】

- 本產品長期留置體內時，每周應更換一次。胃液的長期作用可能使導管硬化。
- 因身體移動而使導管扭曲，有可能造成管路閉塞，固定時要注意導管長度要預留一定餘地。
- 本產品為拋棄式單次使用之無菌產品，切勿重複滅菌或再次使用。
- 一旦發生產品污染或損傷等異常情況時，請勿使用，包裝破損時亦禁止使用。
- 開封後請立即使用，用畢銷毀。

製造業者名稱：Terumo Medical Products(Hangzhou) Co.,Ltd

製造業者地址：M4-9-5 HETZ, 310018 Hangzhou, China

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段4號8樓

- 本產品可能溶出塑化劑鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (Di (2-ethylhexyl) phthalate, DEHP), 男嬰、懷孕或授乳婦女、青春期男性等敏感族群使用本產品時，請醫療專業人員將DEHP之健康風險疑慮納入臨床治療之考量因素。

【使用方法】

1. 撕開包裝袋，從包裝袋中取出產品，注意防止污染。
2. 與連接器或注射器的錐形接頭等，可靠地連接起來。

【使用期限】

- 本產品使用期限為5年。

【滅菌方法】


- 本產品採用環氧乙烷氣體滅菌

【貯存方法】

- 貯存時注意防水，避免陽光直射及高溫多濕。



單次使用

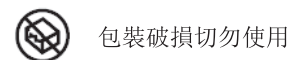

包裝破損切勿使用



參考使用說明



STERILE 滅菌



STERILE EO 經環氧乙烷滅菌