

# “泰爾茂”注射針筒(附針/不附針) “Terumo” Disposable Syringe (With/Without Needle)

衛署醫器輸字第009886號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

## 產品介紹

“泰爾茂”注射針筒（附針/不附針）是一種供單次使用、不含乳膠，經電子光束滅菌的醫療器材，它是以塑膠材質製造，加上熱塑性彈性體的注射襯墊，筒管和注射襯墊塗佈不反應性的矽膠溶液。本器材具有宣稱容積的精確刻度，在尖端為連結鎖尖或滑動尖式，接著是外部標準、上方為白色下方為透明的膠套包裝。本器材和任何標準接頭的錐形針頭均可相容。本器材是非毒性的，也就是說它不含有任何毒素或有毒的有害物質，它也是無熱原的，因此不含任何注入血流後可能引起發燒的藥物雜質。

## 適用情況

泰爾茂針筒器材在接上標準連接錐形針頭後，適用於醫療目的的吸抽及/或注射液體，例如注射藥品溶液到組織如皮間組織、皮下組織、肌肉等或體腔，或是抽血或體液。

## 產品說明

本產品包括主要四個部分，也就是筒管、襯墊、活塞和針頭（如果是含針頭型號），本產品以電子光束滅菌，詳細規格請參閱「PQB-SS004 泰爾茂針頭產品基準」，本產品符合ISO7886-1規範。

## 有效期限


本產品的有效期限是製造起算60個月（5年）。

## 使用方法

- 1.向回撕開最上層的包裝。
- 2.如果是不含針頭的型號，請將針頭緊密接在針筒的尖端，並以沿軸線直拉的方式移除護套。

請勿以手直接接觸套管。

打開膠套包裝（圖1）：向回撕開最上層的包裝。

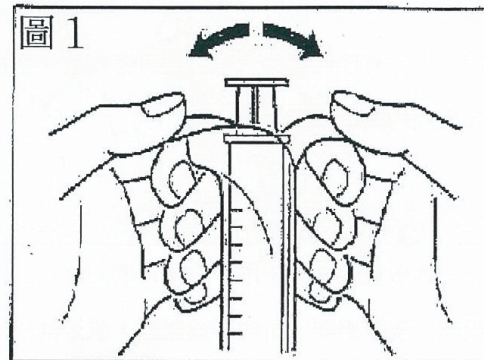

## 警告與注意事項

### 警告

- 1.開啟單一包裝後請立即使用，使用後請適當安全地棄置，以減少感染危機。
- 2.謹慎處理以避免針刺，使用後請勿把針頭護套復位。

### 告誡

- 1.以電子光束滅菌，請勿再滅菌或重複使用。
- 2.如果單一包裝或產品已損壞或污染則請勿使用。
- 3.請勿用於顯影劑的高壓注射。
- 4.請勿存放於極端溫度和濕度的環境，避免直射陽光。

## 產品規格

針筒附針		針筒不附針
<b>1cc</b>	<b>5cc</b>	<b>1cc</b>
SS+01T2516	SS+05L2138	SS+01T
SS+01T2613	SS+05L2232	<b>3cc</b>
SS+01T2713	SS+05L2238	SS+03L
<b>3cc</b>	SS+05L2325	SS+03L1
SS+03L2125	SS+05L2332	SS+03S
SS+03L2138	SS+05S2125	<b>5cc</b>
SS+03L2238	SS+05S2138	SS+05L
SS+03L2325	SS+05S2238	SS+05S
SS+03L2332	SS+05S2325	<b>10cc</b>
SS+03L2338	SS+05S2332	SS+10L
SS+03L2425	<b>10cc</b>	SS+10S
SS+03L2516	SS+10L2025	SS+10ES
SS+03S2238	SS+10L2125	<b>20cc</b>
SS+03S2325	SS+10L2138	SS+20ES
SS+03S2332	SS+10L2232	SS+20S
SS+03S2425	SS+10L2238	SS+20L
SS+03S2516	SS+10L2325	<b>30cc</b>
	SS+10S2125	SS-30S
	SS+10S2138	SS-30ES
	SS+10S2232	SS-30L
	SS+10S2238	<b>60cc</b>
	SS+10S2325	SS+60L
		SS-60L
		SS-60ES
		SS-60C

製造業者名稱：Terumo (Philippines) Corporation

製造業者地址：124 East Main Ave., Laguna,

Technopark, Binan, Laguana, Philippines

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段4號8樓