

# “泰爾茂” 瑟弗柔靜脈留置針

## Terumo Surflo® I.V. Catheter

衛署醫器輸字第010843號

### 用途

其用途為灌注液體至病患體內以做各種臨床應用。它應插入病患的血管系統短期使用（30天以下），可用於抽血或經由靜脈投與液體。

本產品應於滅菌後單次使用，之後遵照當地生物危害廢棄物法規廢棄。

禁止在預期會進行磁振造影(MRI)的情況下使用。

### 警告

- 請熟讀使用指示。
- 如果包裝或產品已損壞或污染時請勿使用。
- 請勿嘗試將部分或已全部抽出的針頭再重新插入。
- 請小心操作以避免針頭刺傷。
- 請勿重複使用或消毒。
- 在單次使用完畢後，須予以適當棄置。
- 請勿存放於極端的溫、濕度環境中，避免直射陽光。

### 使用指示

- 1.以單純扭轉方式破壞封貼，打開容器。
- 2.用雙手將I.V.導管從容器中直接取出。
- 3.位於flashback腔上端表面的盒狀凹痕，即為針頭斜面定位的指標。
- 4.在確認flashback位於flashback腔後，將導管和針頭一起略微向前移動。
- 5.將導管前進到靜脈中。
- 6.緊握導管樞紐，將針頭抽出。
- 7.連接給藥組件並牢牢鎖緊裝置。

### 型號

	Item Code	Catheter Gauge	Color coding	Catheter length	Catheter diameter Ex./In.	Inner needle gauge
1	SR+OT1832C	18G	Deep Green	1 1/4" (32mm)	1.27mm/0.98mm	20G
2	SR+OT1851C			2" (51mm)		
3	SR+OT2032C	20G	Pink	1 1/4" (32mm)	1.02mm/0.80mm	22G
4	SR+OT2225C	22G	Deep Blue	1" (25mm)	0.84mm/0.64mm	24G
5	SR+OT2419C	24G	Yellow	3/4" (19mm)	0.68mm/0.48mm	27G
6	SR+OX1451C	14G	Orange	2" (51mm)	2.17mm/1.73mm	16G
7	SR+OX1464C			2 1/2" (64mm)		
8	SR+OX1632C	16G	Medium Gray	1 1/4" (32mm)	1.72mm/1.32mm	18G
9	SR+OX1651C			2" (51mm)		
10	SR+OX1664C			2 1/2" (64mm)		

11	SR+OX1832C	18G	Deep Green	1 1/4" (32mm)	1.32mm/0.96mm	20G
12	SR+OX1851C			2" (51mm)		
13	SR+OX1864C			2 1/2" (64mm)		
14	SR+OX2025C	20G	Pink	1" (25mm)	1.10mm/0.78mm	22G
15	SR+OX2032C			1 1/4" (32mm)		
16	SR+OX2051C			2" (51mm)		
17	SR+OX2225C	22G	Deep Blue	1" (25mm)	0.89mm/0.62mm	24G
18	SR+OX2419C	24G	Yellow	3/4" (19mm)	0.67mm/0.47mm	27G
1'	SR+OT1832C9	18G	Deep Green	1 1/4" (32mm)	1.27mm/0.98mm	20G
2'	SR+OT1851C9			2" (51mm)		
3'	SR+OT2032C9	20G	Pink	1 1/4" (32mm)	1.02mm/0.80mm	22G
4'	SR+OT2225C9	22G	Deep Blue	1" (25mm)	0.84mm/0.64mm	24G
5'	SR+OT2419C9	24G	Yellow	3/4" (19mm)	0.68mm/0.48mm	27G
6'	SR+OX1451C9	14G	Orange	2" (51mm)	2.17mm/1.73mm	16G
7'	SR+OX1464C9			2 1/2" (64mm)		
8'	SR+OX1632C9	16G	Medium Gray	1 1/4" (32mm)	1.72mm/1.32mm	18G
9'	SR+OX1651C9			2" (51mm)		
10'	SR+OX1664C9			2 1/2" (64mm)		
11'	SR+OX1832C9	18G	Deep Green	1 1/4" (32mm)	1.32mm/0.96mm	20G
12'	SR+OX1851C9			2" (51mm)		
13'	SR+OX1864C9			2 1/2" (64mm)		
14'	SR+OX2032C9	20G	Pink	1 1/4" (32mm)	1.10mm/0.78mm	22G
15'	SR+OX2051C9			2" (51mm)		
16'	SR+OX2225C9	22G	Deep Blue	1" (25mm)	0.89mm/0.62mm	24G
17'	SR+OX2419C9	24G	Yellow	3/4" (19mm)	0.67mm/0.47mm	27G

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段4號8樓

製造業者名稱：Terumo Philippines Corporation

製造業者地址：124 East Main Ave., Laguna Technopark, Binan, Laguna, Philippines

2021-02