

“泰爾茂” 導管操作輔助器

“Terumo” Radifocus Torque Device

衛署醫器輸字第 014542 號

可使用的導線直徑: 0.010” - 0.038”

使用說明

使用前請務必詳閱原廠之使用說明並遵照指示使用。

將“泰爾茂”導管操作輔助器滑上於導管末端的接觸端上。

當“泰爾茂”導管操作輔助器已置於導管上要求的位置時，旋緊螺帽以便將把手夾好定位。

“泰爾茂”導管操作輔助器可以經由旋鬆螺帽再次將它旋緊的方式來重新定位或移除。

適應症、用途

“泰爾茂”導管操作輔助器是一個僅供單次使用及無菌的產品。其效能是為了讓醫師更容易緊握導管,進而更容易操作、旋轉和前進。

告誡

- 使用前熟讀本說明。
- 僅供單次使用 - 請勿再滅菌或重複使用。
- 在未開啟、未破損的包裝內，本產品是無菌無熱原的。
- 如果包裝已破損或污染，則請勿使用“泰爾茂”導管操作輔助器。“泰爾茂”導管操作輔助器在拆封後應立即使用，並在用畢適當予以棄置。
- 存放時避免暴露在水、直射陽光、高溫度或濕度環境中。

告誡：聯邦法律(美國)限制本器材應由醫師或醫師處方販售。

型號

XX*RF02M

製造業者名稱：(O) Terumo Corporation

(P) Ashitaka Factory of Terumo Corporation

製造業者地址：(O) 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

(P) 150, Maimaigi-cho, Fujinomiya City, Shizuoka Prefecture, Japan.

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段4號8樓