

“泰爾茂” 舒適得安全靜脈留置導管 "Terumo" Surshield Surflo II

衛署醫器輸字第019699號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

產品敘述與用途：本產品具輻射不透性，為無熱原之靜脈注射導管。

<警告>

- 請勿在高壓下使用本產品(>21psi/150kPa)。
- 如果包裝或產品已受損，則請勿使用。
- 請勿用手觸摸導管及內針頭。
- 請勿在本體的連結零件部分進行插入。
- 請勿將內針頭重複插入導管中。
- 請勿將本產品重複插入保護器。
- 從插入到用完丟棄，務必小心預防感染。
- 當疑似發生導管有關的併發症時，請中止使用本產品。
- 請於開啟包裝後，立即使用本產品，並在用畢安全地予以丟棄。
- 請勿以鑷子捏擠導管或以指甲擠壓。

- 本產品含有金屬材質，當在預定使用磁共振照影(MRI)的部位使用本產品時，應特別小心。

<注意事項>

- 如果安全蓋已留在導管輪轂內，請小心適當棄置本產品，並以另一個新的重新開始操作程序。
- 當安全蓋已留在內針頭的中間時，請小心棄置內針頭。
- 在抽回內針頭後，請勿觸碰安全蓋，並立即予以丟棄。



牢牢握住導管輪轂，抽回內針頭。

<產品規格>

Catheter gauge	Color code	Product code	Catheter length	Catheter external dia.	Catheter internal dia.	Needle gauge
18G	Deep Green	SR*SFA1832	1 1/4" (32mm)	1.30mm	0.95mm	20G
20G	Pink	SR*SFA2032	1 1/4" (32mm)	1.10mm	0.80mm	22G
22G	Deep Blue	SR*SFA2225	1" (25mm)	0.9mm	0.60mm	24G
24G	Yellow	SR*SFA2419	3/4" (19mm)	0.67mm	0.47mm	27G

製造業者名稱：(O)TERUMO CORPORATION

(P) Kofu Factory of Terumo Corporation

製造業者地址：(O) 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151, Japan

(P) 1727-1, Tsuijiarai, Showa-cho, Nakakoma-gun, Yamanashi Prefecture, Japan

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段4號8樓