

“泰爾茂” 蝶翼靜脈注射針

“Terumo” Surflo Winged Infusion Set

衛部醫器陸輸字第 001502 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

< 適應症 >

本產品適用於使用相容 / 適當的一次性輸液設備進行長達 24 小時，用於醫療目的的靜脈穿刺和靜脈輸液。如考慮到患者體型，本產品可用於任何患者群體。

< 注意事項 >

如果產品包裝損壞，請勿使用。請勿在極端溫度和濕度下儲存。使用後為避免感染風險，應作為醫療廢物，並遵循當地醫療機構政策安全地處理。重複使用會增加感染風險。此產品必須由醫療機構中經過訓練的醫事人員使用。

< 使用說明 >

無菌技術、適當的皮膚準備以及對該部位的保護是必要的，所有使用者都需要遵守注意事項。

注意事項：在使用過程中及後續處置，請保持將雙手放在針頭後面。

使用步驟

1. 打開包裝。
2. 連接輸液套件、注射器等並加以固定。
3. 進行排空和確認輸注液自針頭流出。

靜脈穿刺注射


4. 握住蝶翼並取下針頭保護套。注意：小心不要碰到針頭。(圖一)
5. 進行靜脈穿刺並確認在血管中的正確位置。(圖二)
6. 按照產品使用手冊固定本產品的位置。

使用後

7. 撕下蝶翼上的膠帶（如果有）。
8. 抓住蝶翼，從穿刺部位完全拔出針頭，使用無菌紗布墊向穿刺部位施加壓力。
9. 依照機構的政策、程序和當地「銳利廢棄物」法規處置用過的針頭和裝置。(圖三)

< 不良事件報告 >

如果在使用本產品期間或由於使用本產品而發生嚴重事故，請將其報告給製造業者和 / 或當地銷售代表和所在國家主管機關。

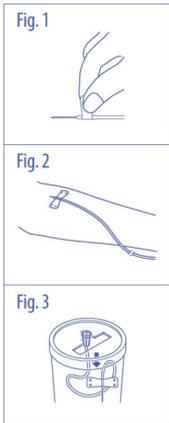

型號

型號	規格
SV*19BLS	19Gx3/4" (3½" Tubing)
SV*21BLS	21Gx3/4" (3½" Tubing)
SV*23BLS	23Gx3/4" (3½" Tubing)
SV*25BLS	25Gx3/4" (3½" Tubing)
SV*19NLK	19Gx3/4" (12" Tubing)
SV*21NLK	21Gx3/4" (12" Tubing)
SV*22NLK	22Gx3/4" (12" Tubing)
SV*23NLK	23Gx3/4" (12" Tubing)
SV*25NLK	25Gx3/4" (12" Tubing)
SV*25EL	25Gx1/2" (8" Tubing)
SV*27EL	27Gx1/2" (8" Tubing)
SV*27ELJ	27Gx1/2" (8" Tubing)

製造業者名稱：Terumo Medical Products(Hangzhou) Co., Ltd.

製造業者地址：M4-9-5 HETZ, 310018 Hangzhou, China

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段 4 號 8 樓

2023-01