

“而至”貼得富牙創保護材

" GC " Teruplug

衛署醫器輸字009842號

使用前請務必詳閱本說明書，並確實地遵照其記載之事項使用本產品。

使用前請仔細閱讀以下說明。

產品概述

本產品是以去端肽膠原製成，可使抗原性降至最低，且經熱處理做交叉鏈結以增加生物相容性。本產品外觀做成海綿塊狀，以利於容易放置在抽取傷口上，它是由纖維狀去端肽膠原及熱變性去端肽膠原所組成。

適用情況

充填抽取傷口處，以加速止血、顆粒化形成、以及保護傷口表面。

禁用情況

本產品採用牛基源的蛋白質做為原始素材，因此禁用於已知曾有對其過敏病史的病人。

警告

如果病人顯現有紅疹、蕁麻疹或其他過敏反應的症狀時，應立即停止使用本產品。

請勿用手碰觸本材料。

使用注意事項

1. 請勿再滅菌或重複使用，本產品僅供單次使用。
2. 如果包裝及／或產品已受損，請勿使用。
3. 一旦單一包裝開啟，如未立即使用時，請予以丟棄。
4. 本產品使用於原先已有氣喘、蕁麻疹或其他過敏反應的病人時，應在使用前先進行評估。
5. 本產品使用於剛分娩或正哺乳中的婦女時，應在使用前先進行評估。
6. 本產品在懷孕婦女的安全性未經研究或建立，因此使用於懷孕婦女時，應評估所伴隨的風險。
7. 本產品不具抗微生物特性，使用本產品時，任何有關抗生素或其他治療使用的決策，應基於考量病人感染風險來判定。
8. 請用縫合或其他方式固定TERUPLUG，否則可能引起本材料的脫位，導致窒息危險。

如何開啟容器

在“撕開此處”的標示處，打開鋁箔包裝，移除塑膠容器。
一面握住容器邊緣，一面以無菌器材取出TERUPLUG。
請勿用手碰觸TERUPLUG。



使用指引

- 1)如果抽取傷口流血過度，請用紗布或其他適當的材料進行止血。
- 2)如有需要，以刮匙刮傷口的牙齦，以刺激周邊組織的滲透作用，使其進入本產品。
 - 如果本產品使用於口腔瘻管，而該口腔瘻管已長時間未予處理，導致黏膜上皮覆蓋瘻管時，在插入TERUPLUG前，請先將黏膜上皮從瘻管剝除。
- 3)選擇比將要充填的傷口尺寸略大的TERUPLUG，使用適當尺寸的TERUPLUG來充填傷口腔洞。以無菌器材將TERUPLUG從容器取出，置於傷口部位。
- 4)請用縫合或其他方式固定 TERUPLUG以避免本材料從傷口部位脫位。
- 5)任何立即的上升、漱口或其他適當處置，均應考量將感染風險降至最低。

存放

- 保持乾燥。
- 遠離熱源，避免直射陽光。
- 請勿存放於極端濕度及溫度超過室溫的處所（30°C／86°F）。

【型號】

Size	Product Code	尺寸 (直徑x長度)
SS	BH-SS15	Ø 8mm x 15mm
	BH*SS15	Ø 8mm x 15mm
S	BH-S25	Ø 8mm x 25mm
	BH*S25	Ø 8mm x 25mm
M	BH-M25	Ø 15mm x 25mm
	BH*M25	Ø 15mm x 25mm

製造業者名稱：(O) GC Corporation

(P) GC Corporation Mishima Factory

製造業者地址：(O) 3-2-14 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033m Japan

(P) 454-1 Higashino, Nagazumi-cho, Sunto-gun, Shizuoka 411-0931, Japan

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段 4 號 8 樓

2023-01