

“泰爾茂”注射針筒（附針/不附針）

“TERUMO” Disposable Syringe (With/Without Needle)

衛署醫器輸字第 009886 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品介紹

“泰爾茂”注射針筒（附針/不附針）是一種供單次使用、不含乳膠，經電子光束滅菌的醫療器材，它是以塑膠材質製造，加上熱塑性彈性體的注射襯墊，筒管和注射襯墊塗佈不反應性的矽膠溶液。本器材具有宣稱容積的精確刻度，在尖端為連結鎖尖或滑動尖式，接著是外部標準、上方為白色下方為透明的膠套包裝。本器材和任何標準接頭的錐形針頭均可相容。本器材是非毒性的，也就是說它不含有任何毒素或有毒的有害物質，它也是無熱原的，因此不含任何注入血流後可能引起發燒的藥物雜質。

適用情況

泰爾茂針筒器材在接上標準連接錐形針頭後，適用於醫療目的的吸抽及/或注射液體，例如注射藥品溶液到組織如皮間組織、皮下組織、肌肉等或體腔，或是抽血或體液。

產品說明

本產品包括主要四個部分，也就是筒管、襯墊、活塞和針頭（如果是含針頭型號），本產品以電子光束滅菌，詳細規格請參閱「PQB-SS004 泰爾茂針頭產品基準」，本產品符合 ISO7886-1 規範。

有效期限

本產品的有效期限是製造起算 60 個月（5 年）。

使用方法


1. 向回撕開最上層的包裝。
2. 如果是不含針頭的型號，請將針頭緊密接在針筒的尖端，並以沿軸線直拉的方式移除護套。

請勿以手直接接觸套管。

打開膠套包裝（圖 1）：向回撕開最上層的包裝。



若為附針產品，透過簡單的扭轉動作，將針頭旋緊到注射器上（圖 2）

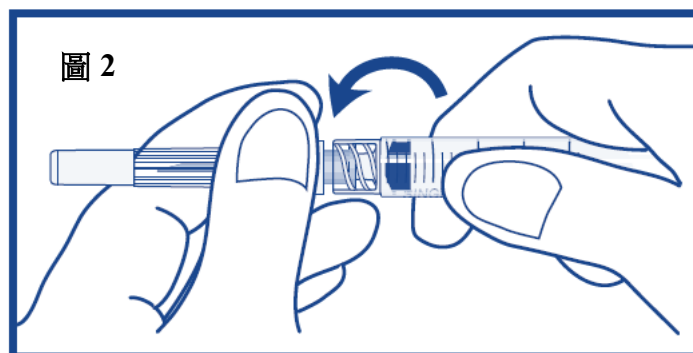

警告與注意事項

警告

1. 開啟單一包裝後請立即使用，使用後請適當安全地棄置，以減少感染危機。
2. 謹慎處理以避免針刺，使用後請勿把針頭護套復位。
3. 針由含有鎳和鈷的不銹鋼製成。鈷被歸類為 CMR* 1B，其濃度以重量計高於 0.1%。

* CMR = 致癌、致突變或生殖毒性（CLP 法規 EU 1272/2008）

告誡

1. 以電子光束滅菌，請勿再滅菌或重複使用。
2. 如果單一包裝或產品已損壞或污染則請勿使用。
3. 請勿用於顯影劑的高壓注射。

4. 產品需儲存於 2- 30 度 C 的環境下。避免直射陽光。產品脆弱，須小心處理。

符號			
	無熱原		型號
	不可重複使用		製造業者
	輻射滅菌		批號
	單一滅菌屏障系統		醫療器材
	包裝破損請勿使用		製造日期
	保存期限		進口商
	歐盟代表		內容物

產品規格

針筒附針	針筒不附針
1cc	1cc
SS+01T2516	SS+01T
SS+01T2613	3cc
SS+01T2713	SS+03L
3cc	SS+03L1
SS+03L2138	SS+03S
SS+03L2325	5cc
SS+03L2332	SS+05L
SS+03L2516	SS+05S
5cc	10cc
SS+05L2138	SS+10L

SS+05L2232	SS+10S
SS+05L2238	SS+10ES
SS+05L2325	20cc
SS+05L2332	SS+20ES
10cc	SS+20L
SS+10L2125	30cc
SS+10L2138	SS-30S
SS+10L2325	SS-30ES
	SS-30L
	60cc
	SS+60L
	SS-60L
	SS-60ES
	SS-60C

製造業者名稱：Terumo (Philippines) Corporation

製造業者地址：124 East Main Ave., Laguna, Technopark, Binan, Laguana, Philippines

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：台北市中正區忠孝西路一段4號8樓