

"泰爾茂" 確保安全針頭

"Terumo" Surguard3 Safety Hypodermic Needle

衛部醫器輸字第 028013 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

無毒性。非熱原性。

本產品不含天然橡樹乳膠成份。


預期用途

本產品用於醫療用途的液體抽取和注射。本產品可相容於具標準套插式 luer 頭和旋緊式 luer 鎖的針筒。此外，從人體拔出針頭後，可手動方式啟動附於其上的安全針鞘，於使用後立即蓋住針頭以減少意外針扎的危險。

使用說明


步驟 1.

採取無菌技術將針頭裝緊於針筒。請抓住針頭基座部分，不要抓安全鞘，推進針筒並以順時針方向旋轉。

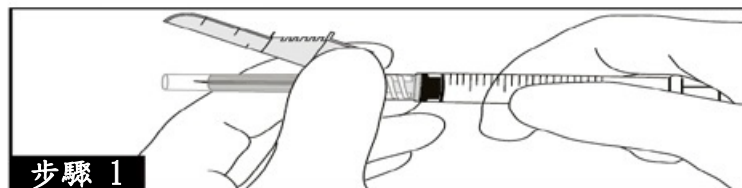


步驟 2.

取下針套前，將安全鞘移動遠離針頭朝向針筒至圖示角度。遵照標準技術執行注射程序。
(註：針頭「斜角朝上」位置即面對安全鞘的位置。)

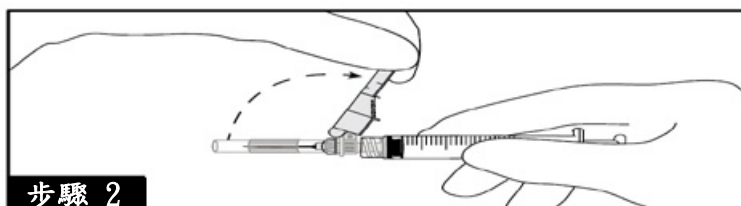


步驟 3.

注射程序後，以單手技術啟動安全機制，可使用以下圖示 3 種方法之一。
(機制啟動可由卡榫發出的聲音及／或觸感得到確認，亦可由肉眼確認。)

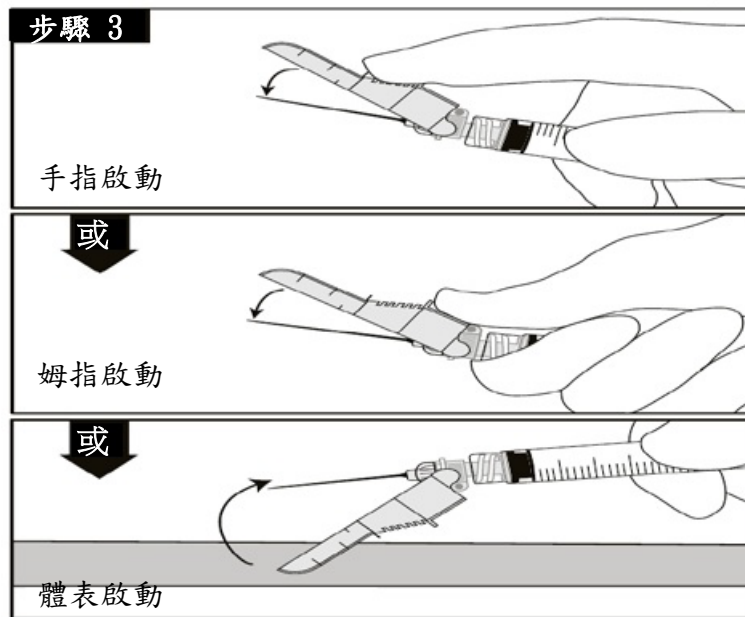

步驟 4.

以肉眼確認安全鞘已完全就位。

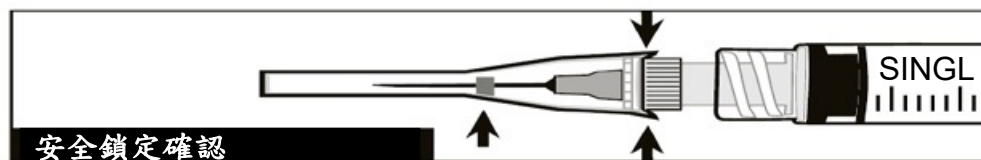

步驟 5.

遵照貴院方針和標準程序，以及國家和地方的尖銳物廢棄規定，廢棄使用過的針頭和其他材料。

禁忌症

無禁忌症。

目標患者族群

適用於一般用途。

預期使用者

醫事人員使用。

警告

- 取用時小心避免針刺。
- 使用後勿套回原針頭套。
- 使用一次後立即丟棄，並遵照當地安全規定處理。
- 針由含有鎳和鈷的不銹鋼製成。鈷被歸類為 CMR* 1B，其濃度以重量計高於 0.1%。

* CMR = 致癌、致突變或生殖毒性（CLP 法規 EU 1272/2008）

小心

- 如果針頭彎曲或損壞，切勿試圖扳直針頭或使用產品。
- 請勿強行使針頭離開安全針鞘以試圖關閉安全裝置。
- 僅限單次使用，不得重覆使用。不得重複滅菌。

注意事項

- 於使用和廢棄時，應全程保持雙手在針頭後方。
- 對所有病患採取通用警戒措施。
- 如果單品包裝或產品有所損壞或污染時請勿使用。

儲存條件

- 產品需儲存於 2- 30°C 的環境下。避免直射陽光。產品脆弱，須小心處理。

事故通報

如果在使用本產品期間或因使用本產品而發生嚴重事故，請向製造業者和/或其授權代表以及您所在國家/地區的主管機關通報。

符號			
	無熱原		型號
	不可重複使用		製造業者
	請參閱使用說明		批號
	輻射滅菌		醫療器材
	單一滅菌屏障系統		製造日期
	包裝破損請勿使用		進口商
	保存期限		內容物
	歐盟代表		脆弱，小心處理
	避免陽光直射		保持乾燥

	限制堆疊小於 N 箱		溫度限制
---	------------	---	------

產品型號

Product Code	Gauge Size	Needle Length
SG3-1825	18G	25mm
SG3-1838		38mm
SG3-1938	19G	38mm
SG3-2025	20G	25mm
SG3-2038		38mm
SG3-2051		51mm
SG3-2138	21G	38mm
SG3-2225	22G	25mm
SG3-2238		38mm
SG3-2325	23G	25mm
SG3-2338		38mm
SG3-2516	25G	16mm
SG3-2525		25mm
SG3-2538		38mm
SG3-2713	27G	13mm
SG3-3013	30G	13mm
SG3+1825	18G	25mm
SG3+1838		38mm
SG3+1916	19G	16mm
SG3+1925		25mm
SG3+1938		38mm
SG3+2025	20G	25mm
SG3+2038		38mm
SG3+2051		51mm
SG3+2125	21G	25mm
SG3+2138		38mm
SG3+2151		51mm
SG3+2213	22G	13mm
SG3+2225		25mm
SG3+2238		38mm
SG3+2325	23G	25mm
SG3+2338		38mm
SG3+2516	25G	16mm
SG3+2525		25mm
SG3+2538		38mm
SG3+2609	26G	9mm
SG3+2713	27G	13mm

Product Code	Gauge Size	Needle Length
SG3+3013	30G	13mm

製造業者名稱：Terumo (Philippines) Corporation

製造業者地址：#124 East Main Avenue, Laguna Technopark, Binan, Laguna, Philippines

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商名稱：台北市中正區忠孝西路一段4號8樓