

“泰爾茂”瑟弗柔靜脈留置針

“Terumo” Surflo I.V. Catheter

衛署醫器輸字第 010843 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

用途

其用途為灌注液體至病患體內以做各種臨床應用。它應插入病患的血管系統短期使用（30 天以下），可用於抽血或經由靜脈投與液體。

本產品應於滅菌後單次使用，之後遵照當地生物危害廢棄物法規廢棄。

禁止在預期會進行磁共振造影(MRI)的情況下使用。

警告

- 請熟讀使用指示。
- 如果包裝或產品已損壞或污染時請勿使用。
- 請勿嘗試將部分或已全部抽出的針頭再重新插入。
- 請勿在插入部位附近或使用剪刀或其他尖銳物。
- 請小心操作以避免針頭刺傷。
- 儲存溫度在 2°C 至 30°C 之間。保持乾燥。避免陽光直射。易碎，小心處理
- 一次性使用後請安全處理，以避免感染風險。
- 針由含有鎳和鈷的不銹鋼製成。鈷被歸類為 CMR* 1B，其濃度以重量計高於 0.1%。
* CMR = 致癌、致突變或生殖毒性（CLP 法規 EU 1272/2008）

使用指示

1. 以單純扭轉方式破壞封貼，打開容器。
2. 用雙手將 I.V.導管從容器中直接取出。
3. 位於 flashback 腔上端表面的盒狀凹痕，即為針頭斜面定位的指標。
4. 在確認 flashback 位於 flashback 腔後，將導管和針頭一起略微向前移動。
5. 將導管前進到靜脈中。
6. 緊握導管樞鈕，將針頭抽出。
7. 連接給藥組件並牢牢鎖緊裝置。

符號			
	無熱原		型號
	不可重複使用		製造業者
	輻射滅菌		批號
	單一滅菌屏障系統		醫療器材
	包裝破損請勿使用		製造日期
	保存期限		進口商
	歐盟代表		內容物

型號

	Item Code	Catheter Gauge	Color coding	Catheter length	Catheter diameter Ex./In.	Inner needle gauge
1	SR+OT1832C	18G	Deep Green	1 1/4" (32mm)	1.27mm/0.98mm	20G
2	SR+OT1851C			2" (51mm)		
3	SR+OT2032C	20G	Pink	1 1/4" (32mm)	1.02mm/0.80mm	22G
4	SR+OT2225C	22G	Deep Blue	1" (25mm)	0.84mm/0.64mm	24G
5	SR+OT2419C	24G	Yellow	3/4" (19mm)	0.68mm/0.48mm	27G
6	SR+OX1451C	14G	Orange	2" (51mm)	2.17mm/1.73mm	16G
7	SR+OX1464C			2 1/2" (64mm)		
8	SR+OX1632C	16G	Medium Gray	1 1/4" (32mm)	1.72mm/1.32mm	18G
9	SR+OX1651C			2" (51mm)		
10	SR+OX1664C			2 1/2" (64mm)		
11	SR+OX1832C	18G	Deep Green	1 1/4" (32mm)	1.32mm/0.96mm	20G
12	SR+OX1851C			2" (51mm)		
13	SR+OX1864C			2 1/2" (64mm)		
14	SR+OX2025C	20G	Pink	1" (25mm)	1.10mm/0.78mm	22G
15	SR+OX2032C			1 1/4" (32mm)		
16	SR+OX2051C			2" (51mm)		
17	SR+OX2225C	22G	Deep Blue	1" (25mm)	0.89mm/0.62mm	24G
18	SR+OX2419C	24G	Yellow	3/4" (19mm)	0.67mm/0.47mm	27G

製造業者名稱：Terumo Philippines Corporation

製造業者地址：124 East Main Ave., Laguna, Technopark, Binan, Laguana, Philippines

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：台北市中正區忠孝西路一段4號8樓