

"泰爾茂"注射針

"Terumo" Needle

衛部醫器輸字第 028724 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

<產品敘述>

本產品為使用電子束滅菌、不含乳膠的單次用醫療器材，以塑膠和不銹鋼材質製成。針頭上有潤滑劑塗層，使用高黏性的黏合劑或黏著劑接著於裝置本體。本裝置相容於標準套插式和旋緊式 Luer 管件注射筒。本裝置不具毒性，不含任何毒素或有毒的傷害性物質。它為非熱原性，即不含任何可能在注入血流後引起發燒的物質。本產品以單支包裝於泡罩中，可保持產品的滅菌狀態。

<用途>

本產品裝置的使用，需配合標準套插式和旋緊式 Luer 管件注射筒(本許可證未包含此產品)，用途為抽取及／或注射醫療用液體，例如注射藥液進入組織和體腔，或採集血液和體液。每根針頭在滅菌後僅限使用一次，使用後即應依照當地規定安全廢棄。

<警告／注意事項>

警告

- 開啟包裝後請立即使用。使用後應適當廢棄針頭以降低感染風險。
- 拿取時請小心避免針扎。使用後請勿套回針頭套。

注意事項


- 僅限單次使用。使用電子束滅菌。不得重新滅菌或再使用。
- 如果產品或包裝有破損或污染時請勿使用。

<使用說明>

1. 如圖示打開透明塑膠包裝。
2. 將針頭穩固接至針筒。
3. 直拉針頭套以移除之。針頭已滅菌可直接使用。

小心

避免拿取沒有針頭套的針頭。

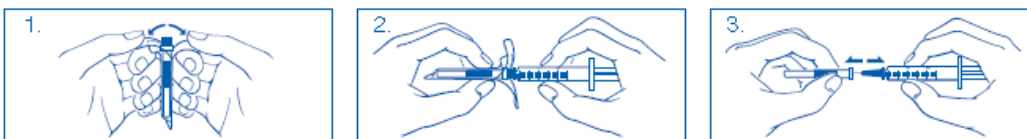

- 請勿儲存於極端的溫濕度中。儲存時避免接觸水或直射日光。

產品規格

Product Code	Gauge Size	Needle Length	Wall Type	Hub Color
NN+1838R	18G	38 mm (1 ½")	Thin Wall	Pink
NN+2132R	21G	32mm (1 ¼")	Thin Wall	Deep Green

<包裝數量>

Packaging	Component	Packaging Dimension	Packaging Quantity
Blister	Long Type	87 x 20 mm	1 pc
	Short Type	76 x 20 mm	
Unit Box (ID)	Long Type	111 x 85 x 88 mm	100 pcs
	Short Type	111 x 85 x 78 mm	
Carton Box (ID)	Long Type	435 x 232 x 267 mm	3000 pcs
	Short Type	435 x 232 x 237 mm	

製造廠名稱：Terumo (Philippines) Corporation

製造廠地址：124 East Main Avenue, Laguna Technopark, Binan, Laguna, Philippines

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：台北市中正區忠孝西路一段 4 號 8 樓